

**ESTADO DA PARAÍBA
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE
GERÊNCIA EXECUTIVA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE
LABORATÓRIO CENTRAL DE SAÚDE PÚBLICA**

NOTA INFORMATIVA Nº 02, DE 2018 GEVS/LACEN/SES-PB

Assunto: Distribuição dos Testes Rápidos de Dengue IgM /IgG Bahiafarma e Chikungunya IgM /IgG.

Na Paraíba no período de 01 de Janeiro a 30 de Dezembro de 2017 (52ª semana epidemiológica), foram notificados 4.415 casos suspeitos de dengue. Em 2014, 2015 e 2016 registraram respectivamente, 7.647, 30.178 e 44.517 casos. Ainda em 2017 foram registrados 1.821 casos notificados de Chikungunya e 2016 foram 21.486 casos suspeitos. De Zika foram registrados 195 casos com suspeita de Zika Vírus (Sinan NET) em 2017 e em 2016 foram registrados 4.924 casos.

Considerando a situação epidemiológica das arboviroses no Estado e por se tratar de doenças de notificação compulsória, conforme Portaria nº 204 de 17 de fevereiro de 2016, todo caso suspeito de dengue, Chikungunya e zika deve ser notificado independente da realização ou resultado do teste rápido.

A tecnologia do teste rápido indica se o paciente teve infecção recente (IgM) ou antiga (IgG) pelo vírus dengue, Chikungunya em algum momento da vida. Dessa forma os testes serão utilizados para triagem inicial de amostras de pacientes que atendam aos critérios de definição de caso suspeito de agravamento.

Todos os casos com resultado reagente no teste rápido deverão ter amostra coletada considerando a oportunidade (data de início de sintomas) para cada doença e encaminhada ao LACEN, para confirmação por ensaios imunoenzimáticos (ELISA) ou por outras metodologias. Vale ressaltar que cada instituição deverá escolher o método de coleta que melhor se adeque a sua rotina, e seguir rigorosamente as instruções do quadro abaixo:

TESTE RÁPIDO	AMOSTRA BIOLÓGICA	ORIENTAÇÕES PARA COLETA
TESTE RÁPIDO DENGUE IgM/IgG BAHIAFARMA	SORO	Coletar sangue total em tubo de coleta sem anticoagulantes por punção intavenosa. Após repouso de 30 minutos, centrifugar para separação do soro.
	PLASMA	Coletar sangue total em tubo de coleta com anticoagulantes por punção intravenosa. Centrifugar para separação do plasma.
	SANGUE TOTAL (coleta por punção intravenosa)	Coletar por punção intravenosa em tubos contendo anticoagulante, podendo ser armazenados por até dias sob temperatura de 2 a 8°C.
	SANGUE TOTAL	Coletar por punção digital com uso de lanceta estéril.



ESTADO DA PARAÍBA
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE
GERÊNCIA EXECUTIVA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE
LABORATÓRIO CENTRAL DE SAÚDE PÚBLICA

TESTE RÁPIDO CHIKUNGUNYA IgM - BAHIAFARMA	(coleta com lanceta)	Retirar 10 microlitros com auxílio de tibo capilar.
	SORO	Coletar sangue total em tubo de coleta sem anticoagulantes por punção intravenosa. Após repouso de 30 minutos, centrifugar para separação do soro.
	PLASMA	Coletar sangue total em tubo de coleta com anticoagulantes por punção intravenosa, centrifugar para separação do plasma.
	SANGUE TOTAL (coleta por punção intravenosa)	Coletar por punção intravenosa em tubos contendo anticoagulantes, podendo ser armazenados por até dias sob temperatura de 2 a 8°C.
TESTE RÁPIDO ZIKA IgM/IgG COMBO - BAHIAFARMA	SANGUE TOTAL (coleta com lanceta)	Coleta por punção digital com uso de lanceta estéril. Retirar 10 microlitros com auxílio de tubo capilar
	SORO	Coletar sangue total em tubo de coleta sem anticoagulantes por punção intravenosa. Após repouso de 30 minutos, centrifugar para separação do soro.

Os testes serão distribuídos pelo LACEN/PB nos serviços habilitados e qualificados para a realização dos testes, conforme elencados no quadro abaixo:

Serviços de saúde qualificados para a realização do teste rápido na Paraíba.			
1ª	Maternidade Cândida Vargas – João Pessoa	6ª	Maternidades Peregrino Filho - Patos
	Maternidade Frei Damião – João Pessoa		Hospital Infantil - Patos
	HULW – João Pessoa		Hospital Regional - Patos
	Hospital Edson Ramalho – João Pessoa		UPA - Patos
	Hospital Arlinda Marques – João Pessoa		Hospital e Maternidade Sinhá Carneiro – Stª Luzia
	UPA Valentina – João Pessoa	7ª	Hospital Regional - Piancó
	UPA Cruz das Armas – João Pessoa		UPA - Piancó
	UPA Oceania – João Pessoa		Hospital Regional - Itaporanga
	LACEN Municipal – João Pessoa		Hospital Estevão Marinho - Coremas
	Hospital Alfredo Barbosa - Cabedelo		
2ª	Hospital Regional e UPA de Guarabira	8ª	Hospital Regional - Catolé do Rocha
3ª	ISEA – Campina Grande	9ª	Hospital Regional - Cajazeiras
			Upa - Cajazeiras
	FAP – Campina Grande	10ª	Upa - Sousa
			Hospital Regional - Sousa
	Hosp. Universitário Alcides Carneiro – Campina Grande	11ª	Upa - Princesa Isabel
			Hospital Regional - Princesa Isabel



ESTADO DA PARAÍBA
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE
GERÊNCIA EXECUTIVA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE
LABORATÓRIO CENTRAL DE SAÚDE PÚBLICA

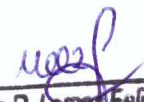
	UPA - Campina Grande	12 ^a	Hospital Regional - Itabaiana
	Hospital Regional - Queimadas	13 ^a	Hospital Regional - Pombal
4 ^a	Hospital Regional - Picuí	14 ^a	Hospital Regional - Mamanguape
	Hospital Regional - Cuité		
5 ^a	Upa - Monteiro		
	Maternidade Santa Filomena – Monteiro		

O LACEN está disposição para esclarecimentos nos contatos: (83) 3218-5922 / (83) 98845-2789.

João Pessoa, 26 de janeiro de 2018.


Renata Valéria Nóbrega
Gerente Executiva de Vig. em Saúde/SES-PB
Mat. 181.387-1

Renata Valéria Nóbrega
Gerente Executiva de Vigilância em Saúde
Mat. 181.387-1


Dra. Marta R. Lemos Felinto
Dir. Geral LACEN/PB
Mat. 138.688-3

Marta Rejane Lemos Felinto
Diretora geral do LACEN-PB
Mat. 138688-3